



Crochet et boucle de fermeture
TOURNIQUET
Manuel d'utilisation

Utilisation prévue

Les tourniquets sont des dispositifs non gonflables (non pneumatiques) destinés à être utilisés comme moyen efficace pour obtenir une constriction contrôlée des vaisseaux. Un garrot sans latex avec fermeture de contact Hook & Loop peut être appliqué facilement et instantanément pour une constriction veineuse ou artérielle parfaite.

Avertissements

- Mise en garde:** Des blessures graves ou la mort peuvent résulter d'une mauvaise utilisation de cet équipement.
- Mise en garde:** Cet équipement a été conçu et fabriqué pour une utilisation par des professionnels expérimentés seulement.
- Mise en garde:** N'essayez pas d'utiliser cet équipement sans une formation adéquate.
- Mise en garde:** Ce produit est seulement testé pour supporter 30 utilisations.
- Mise en garde:** Ce produit ne peut pas être stérilisé et doit être jeté s'il est contaminé.

Instructions

1. Lors de l'application du garrot, assurez-vous que l'étiquette est sur la peau.
 2. Tenir fermement l'étiquette d'une main et en même temps, étirer le garrot pour entourer le membre.
 3. Ajuster à la tension désirée pour l'utilisation clinique ou de premier secours, verrouiller en place avec la fermeture de contact de crochet et de boucle.
-

Entretien et maintenance

Nettoyez le garrot avec une lingette imbibée d'alcool après chaque utilisation.



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Inspecté aux États-Unis
Fabriqué en Chine
tél: 631-273-9600, 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com