



Chiusura con gancio e anello

LACCIO Manuale utente

Uso previsto

I lacci emostatici sono dispositivi non gonfiabili (non pneumatici) destinati a essere utilizzati come un modo efficace per ottenere la costrizione controllata delle navi. Laccio emostatico privo di lattice con chiusura a contatto Hook & Loop può essere applicato facilmente e istantaneamente per una perfetta costrizione venosa o arteriosa.

Avvertenze

- Attenzione:** Lesioni gravi o morte possono derivare dall'uso improprio di questa apparecchiatura.
- Attenzione:** Questa apparecchiatura è stata progettata e realizzata per essere utilizzata solo da professionisti esperti.
- Attenzione:** Non tentare di utilizzare questa attrezzatura senza un allenamento adeguato.
- Attenzione:** Questo prodotto è testato solo per resistere a 30 usi.
- Attenzione:** Questo prodotto non può essere sterilizzato e deve essere scaricato se viene contaminato.

Istruzioni

1. Quando si applica il laccio emostatico, assicurarsi che l'etichetta sia rivolta verso il basso sulla pelle.
 2. Tenere saldamente l'etichetta con una mano e, al tempo stesso, allungare il laccio emostatico per circondare l'arto.
 3. Regolare la tensione desiderata per l'uso clinico o di pronto soccorso, bloccarlo con la chiusura del contatto Hook & Loop.
-

Cura e manutenzione

Pulire il laccio emostatico con una salvietta imbevuta di alcool dopo ogni utilizzo.



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Ispezionato negli Stati Uniti.

Fatto in Cina

tel: 631-273-9600, 1-800-232-2670

fax: 631-273-9659

www.adctoday.com

email: info@adctoday.com