

# Diagnostix™

# ADSTATION™

Modulares Diagnosesystem



# ADC® Diagnostix™ Adstation™ Wallboard-Installation

Ihr Diagnostix™ Adstation™ kommt komplett mit montiert Wallboard, Montage Mollies und Holz Schrauben für einfache Installation.


1. Wählen Sie einen Ort für den ADC® Diagnostix™ Adstation™ in der Nähe des Untersuchungstisches und einer Steckdose. Siehe Abbildung 1.
2. Wir empfehlen eine Höhe von 170 cm (170 cm) vom Boden bis zum oberen Rand des Wallboards. Siehe Abb. 2-3.
3. **Verwenden von Mollies (Small Wallboard):** Markieren Sie auf der ausgewählten Wand eine horizontale Linie mit einer Ebene, um die Oberseite des Wallboards anzuzeigen. Halten Sie die Wandplatte in der gewünschten Position, markieren Sie durch die Befestigungslöcher die Position der Schrauben. Wandplatte entfernen. Drücken Sie die Spitze des Mollie in die Trockenmauer mit einem # 2 Phillips Schraubendreher oder Schraubpistole in die markierten Punkte. Fahren Sie Mollies im Uhrzeigersinn in die Trockenmauer, bis sie bündig mit der Außenwandoberfläche aufhört.



Die Tafel über die Anker stellen und die Tafel durch Einsetzen von Schrauben und Festziehen sichern. Achten Sie darauf, dass Sie die Kontrollschrauben sorgfältig überprüfen. Benutzen Sie die beiliegenden Schraubverschlüsse oben auf jeder Schraube, sobald sie fest verschlossen sind.

**4. Verwenden von Studs (Large Wallboard):** Auf der ausgewählten Wand finden und markieren Markieren Sie eine waagerechte Linie (ca. 67 in. - 170 cm) vom Boden mit einer Ebene, um die Oberseite Ihrer Wandtafel anzuzeigen. Zentrieren Sie die Bohrlöcher am ersten Bolzen und markieren Sie. Während Sie die Wandplatte in der gewünschten Position halten, verwenden Sie die mitgelieferten Holzschrauben und sichern Sie die oberen Ecken in die Wand / Bolzen, während die doppelte Überprüfung, dass die Wandplatte eben ist. Wiederholen Sie für alle Befestigungsschrauben. Benutzen Sie die beiliegenden Schraubverschlüsse oben auf jeder Schraube, sobald sie fest angezogen sind, um zu beenden.

**5. Modulanschlüsse:** Um zusätzliche Erweiterungsmodule hinzuzufügen, müssen sie vor der Montage an der Wandtafel elektrisch mit der Trafostation verbunden werden.

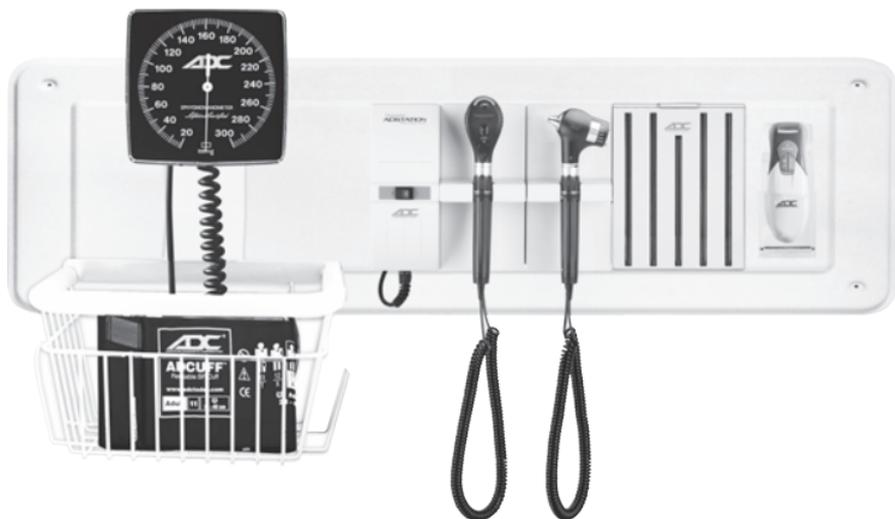

Verwenden Sie das beiliegende Modul-Anschlusskabel, stecken Sie eine Seite des Steckers in die Steckdose des Transformator-Moduls auf der rechten Seite Transformator-Panel hinter Schiebetür.


Stecken Sie das gegenüberliegende Ende in den Erweiterungsmodulkontakt, der sich auf der linken Schiebetür befindet.

Wenn Sie zusätzliche Module hinzufügen, muss jeder in ähnlicher Weise mit den zusätzlichen Verbindungskabeln für jedes Modul verbunden werden.

Vermeiden Sie eine überschüssige Verdrahtung in jede Verlängerung, um eine enge Seite-an-Seite-Passung zu jedem Erweiterungsmodul zu gewährleisten.


**ACHTUNG:** Beim Anschließen des Anschlusskabels ist darauf zu achten, dass die 4 Kontakte der Steckdosenleiste mit den 4 Kontakten der Stiftleiste (Abb. 4) korrekt verbunden sind.

**6. Montage der Adstation<sup>TM</sup>-Module:** Nachdem alle Module elektrisch angeschlossen sind, können Sie den Transformator und die Zusatzmodule sorgfältig an die Wandmontage anbringen. Vergewissern Sie sich, dass sich jedes Modul sicher nach unten befindet.

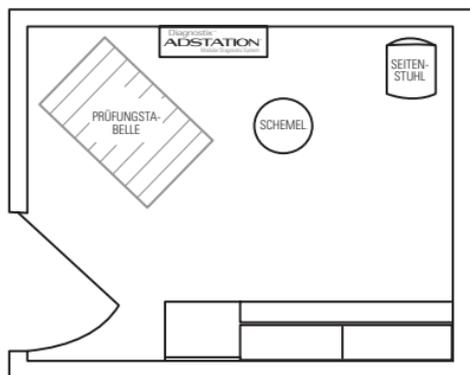


(Abbildung 1)

## Kleine Wallboard

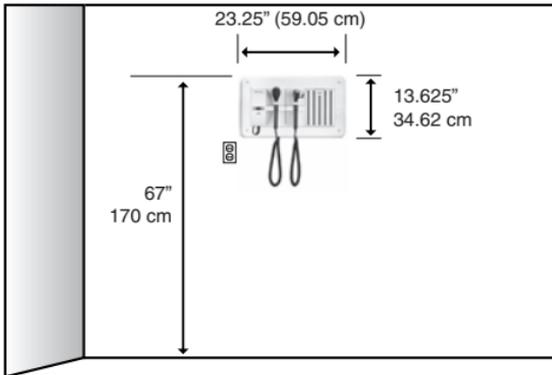


(Abbildung 2)

## Großes Wallboard

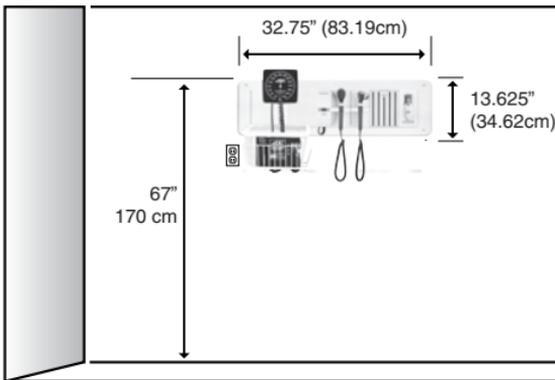

(Abbildung 3)

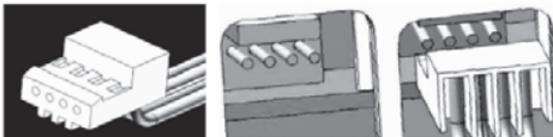

(Abbildung 4)