

Diagnostix™

ADSTATION™

Sistema Diagnostico Modulare



ADC® Diagnostix™ Adstation™

Installazione a parete

Il tuo Diagnostix™ Adstation™ viene fornito completo di Wallboard assemblato, molle di montaggio e viti in legno per una facile installazione.


1. Scegliere una posizione per l'ADC® Diagnostix™ Adstation™ vicino alla tabella di esame e una presa elettrica. Vedere la Figura 1.
2. Si consiglia un'altezza di 170 cm dal pavimento al bordo superiore del tuo Wallboard. Vedere le figure 2-3.
3. **Uso di Mollies (piccolo pannello):** Nella parete selezionata, contrassegnare una linea orizzontale utilizzando un livello, per indicare la parte superiore del pannello di parete. Tenendo il pannello di parete nella posizione desiderata, contrassegnare con i fori di montaggio la posizione delle viti. Rimuovere il pannello di parete. Premere la punta di mollie nel muro a secco usando un cacciavite a 2 viti Phillips o una pistola a vite nei punti contrassegnati. Azionare i molli in senso orario nel muro a secco finché non si arresta in linea con la superficie esterna della parete.



Riposizionare il pannello di appoggio sopra gli ancoraggi e fissare il pannello di fissaggio inserendo le viti e serrando. Assicurarsi di controllare il livello prima di installare tutte le viti di montaggio. Usare i cappucci a vite chiusi sulla parte superiore di ogni vite una volta che sono saldamente serrati per finire.

4. Utilizzo di borchie (Large Wallboard): Individuare e contrassegnare borchie sulla parete selezionata. Segna una linea orizzontale (circa 67 cm - 170 cm) dal pavimento con un livello, per indicare la parte superiore del tuo parete. Centrare i fori del foro sul primo foro e contrassegnare. Tenendo il pannello di parete nella posizione desiderata, utilizzare le viti in legno fornite e fissare gli angoli superiori nella parete / borchie, mentre doppio controllo del livello di parete. Ripetere per tutte le viti di fissaggio. Usate i cappucci a vite chiusi sulla parte superiore di ogni vite una volta che sono saldamente serrati, per finire.

5. Connettività del modulo: Per aggiungere altri moduli di prolunga, devono essere collegati elettricamente con la stazione di trasformazione prima di montarlo sul pannello di supporto.

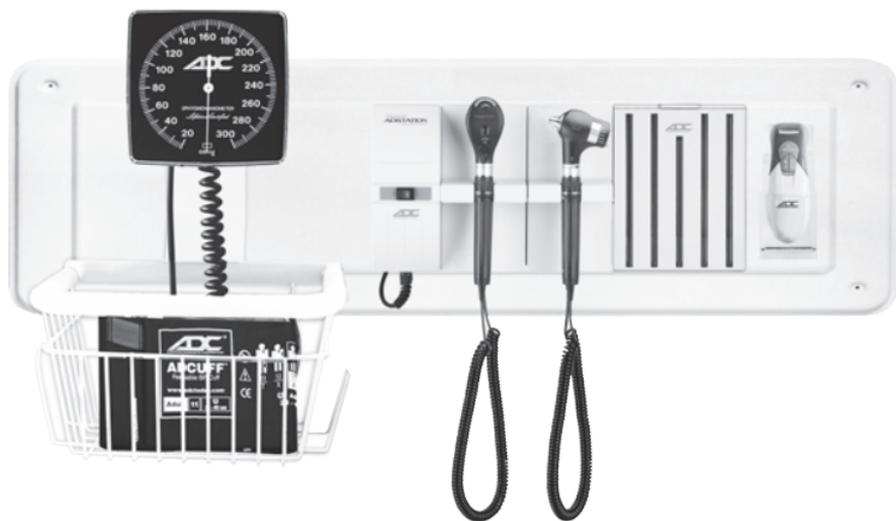

Usando il cavo di collegamento del modulo collegato, collegare un lato del connettore nella presa del modulo trasformatore situato sul pannello di trasformazione a destra dietro la porta scorrevole.


Inserire l'estremità opposta nel contatto del modulo di prolunga, posizionato sulla porta scorrevole del pannello laterale sinistro.

Quando si aggiungono moduli aggiuntivi, ciascuno deve essere collegato in modo simile utilizzando i cavi di connessione aggiuntivi per ogni modulo.

Estrarre i cablaggi in eccesso in ciascuna estensione per assicurare un corretto accoppiamento ad ogni modulo di estensione.


ATTENZIONE: durante il collegamento del cavo di collegamento, assicurarsi che i 4 contatti della striscia siano posizionati in modo positivo ai 4 contatti della striscia (fig. 4).

6. Montaggio dei moduli Adstation™: dopo che tutti i moduli sono collegati elettricamente, è ora possibile attendere accuratamente il trasformatore e moduli aggiuntivi sui perni di montaggio a parete. Assicurarsi che ogni modulo si blocca saldamente in posizione in discesa.

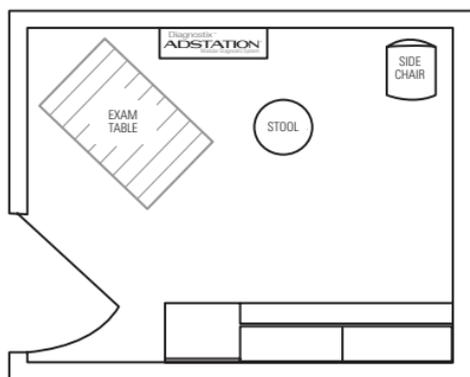


(Figura 1)

Piccolo pannello di parete

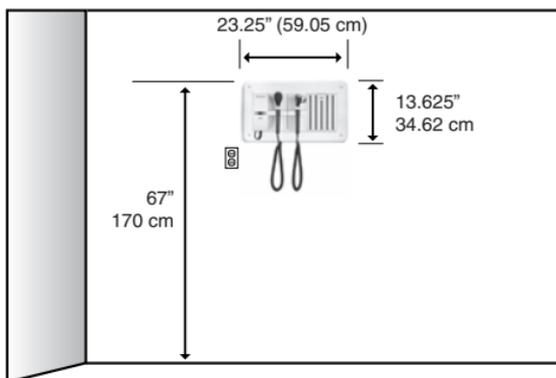


(Figura 2)

Grande pannello di parete

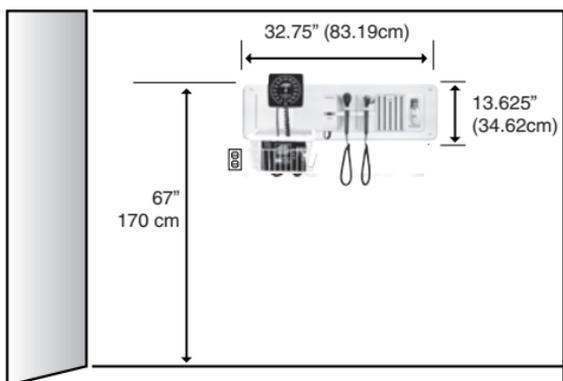

(Figura 3)

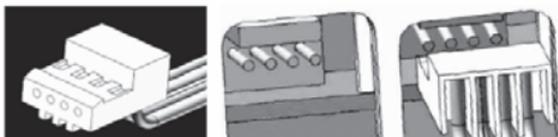

(Figura 4)