

Diagnostix™
ADSTATION
Modulares Diagnosesystem™

Specula Extension Montageanleitung

Nach dem Anbringen der Spekula-Bohrschablone in die gewünschte Position an der Wand bohren Sie die 2 passenden Löcher (7/32" (5,556 mm) Durchmesser und 1,25" (32 mm) tief wie angegeben. Schieben Sie die mitgelieferten Mollies so weit wie möglich Geh in die Bohrlöcher in der Wand.

Setzen Sie die mitgelieferten Distanzhülsen (1) auf die Kuppel (2) des Halters (3).

Die Schrauben sollten nun in die mitgelieferten Löcher (4) in den Halter (3) geschoben werden.


Legen Sie den Halter an die Wand, so dass die Schrauben mit den Steckern aufreißen und festschrauben.

Wenn der Halter fest an der Wand befestigt ist, sollte das Gehäuse wie folgt an der Halterung befestigt werden.

Setzen Sie das Gehäuse so auf die Halterung, dass die T-Nuten (5) genau über den T-Nutführungen (6) liegen, das Gehäuse sollte nun gleichmäßig nach hinten geschoben werden, bis es einrastet. Das Gehäuse sollte mit den Sichtfenstern des Halters eben sein.

Setzen Sie den Deckel (7) in die vorgesehene Stelle (8).

Die Spekula kann nun wie gewünscht gefüllt werden.

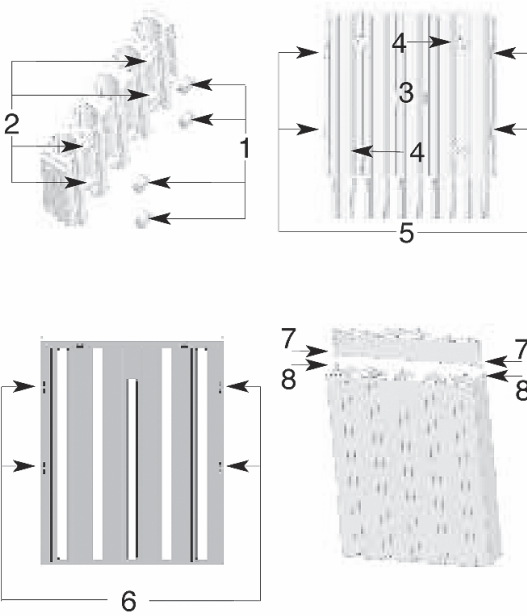

 ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788

 ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

 Gebrauchsanweisung beachten  Typ BF aufgetragener Teil



IB p/n 93-5630-00

Hergestellt in Deutschland
Inspektion und verpackt in der U.S.A.

tel: 631-273-9600
gebührenfrei: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com



Gedruckt in U.S.A.