

Diagnostix™

ADSTATION

Systeme de Diagnostic Modulaire™

Instructions d'assemblage de la speculation

Après avoir tapé le gabarit de forage de speculation dans la position désirée sur le mur, percez les 2 trous appropriés (diamètre de 7/32" (5.556 mm) et 1.25" (32 mm) de profondeur comme indiqué. Poussez les mollies fournies aussi loin qu'elles le feront. aller dans les forets dans le mur.

Mettez les manchons d'entretoise fournis (1) sur le dôme (2) du support (3).

Les vis devraient maintenant être enfoncées dans les trous prévus (4) dans le support (3).

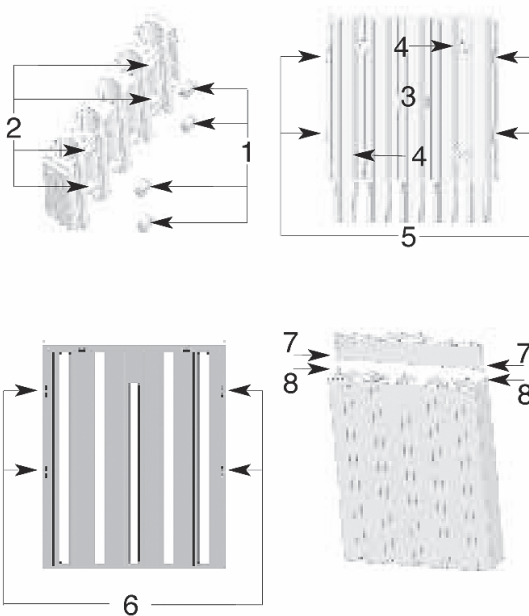
Placez le support sur le mur afin que les vis s'alignent avec les bouchons et visser fermement.

Lorsque le support est fermement en place sur le mur, le boîtier doit être fixé au support comme suit.

Placez le boîtier sur le support de sorte que les rainures en T (5) soient exactement sur les guides à rainure en T (6), le boîtier doit maintenant être poussé uniformément vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le boîtier doit être au niveau des vitres d'affichage du support.



Placez le couvercle (7) dans l'emplacement prévu (8).

Les spéculums peuvent maintenant être remplis comme vous le souhaitez.




ADC
 55 Commerce Drive
 Hauppauge, NY 11788


ADC (UK) Ltd.
 Unit 6, PO14 1TH
 United Kingdom

 Consultez les instructions d'utilisation
  Type BF partie appliquée



IB p/n 93-5630-00

Fabriqué en Allemagne
 Inspecté et emballé aux États-Unis

tél: 631-273-9600
 sans frais: 1-800-232-2670
 télécopieur: 631-273-9659

www.adctoday.com

Courrier électronique: info@adctoday.com



Imprimé aux États-Unis