


Remarques spéciales sur l'installation

COMPATIBILITÉ DU TRANSFORMATEUR

Transformateur (face arrière)

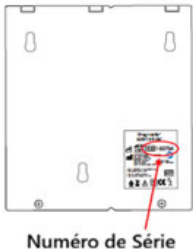


Si vous avez acheté une unité d'extension destinée à être utilisée avec un **transformateur Adstation plus ancien**, veuillez vérifier le numéro de série du transformateur avant l'installation. L'unité d'extension contenue dans cette expédition est compatible uniquement avec un transformateur dont le numéro de série est égal ou supérieur à 100000. Des dommages surviendront si elle est associée à un transformateur plus ancien.

Si cet achat comprend à la fois un transformateur et un module d'extension, la compatibilité a déjà été vérifiée.

CÂBLE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE

Après avoir connecté les modules avec le câble électrique (voir les Instructions d'installation du wallboard), veillez à ce que l'excédent de câble soit rangé solidement à l'intérieur du cadre du module avant le montage au mur ou sur le wallboard.

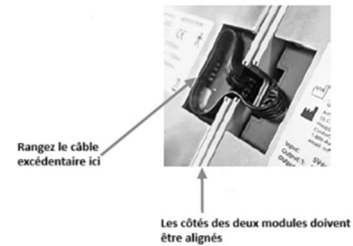

Garantie: Les transformateurs et modules d'extension Diagnostix Adstation sont garantis pendant cinq ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une manipulation inappropriée, des accidents, une utilisation incorrecte ou des modifications apportées à l'instrument par des tiers. Les dommages causés par le raccordement de modules d'extension incompatibles ne sont pas couverts ; veuillez vérifier la compatibilité de tous les composants avant l'installation. La garantie n'est valable qu'après l'enregistrement du produit en ligne à l'adresse:

www.adctoday.com/support/warranty-registration.



American Diagnostic Corporation
55 Commerce Drive, Hauppauge, NY 11788

tel: 631-273-9600
toll free: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com

IB p/n 93-5699-00 rev 4 (05/06/24)

Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur
www.adctoday.com
et suivez les liens

Pour toute question, commentaire ou suggestion,
appelez aux U.S.A. le numéro vert :
1-800-ADC-2670

Imprimé aux U.S.A.