


Notas Especiales de Instalación

COMPATIBILIDAD DE TRANSFORMADORES

Transformador (parte posterior)

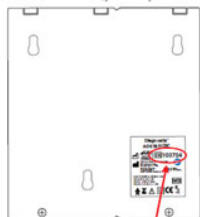


NÚMERO DE SERIE

Si ha adquirido una unidad de extensión para utilizar con un **transformador Adstation más antiguo**, verifique el número de serie del transformador antes de la instalación. La unidad de extensión de este envío es compatible únicamente con un transformador cuyo número de serie sea 100000 o superior. Se producirán daños si se combina con un transformador más antiguo.

Si esta compra incluye tanto un transformador como un módulo de extensión, ya hemos confirmado la compatibilidad.

CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

Después de conectar los módulos con el cable eléctrico (consulte las Instrucciones de instalación del panel de pared), asegúrese de que el exceso de cable quede firmemente guardado dentro del marco del módulo antes de montarlo en la pared o en el panel de pared.

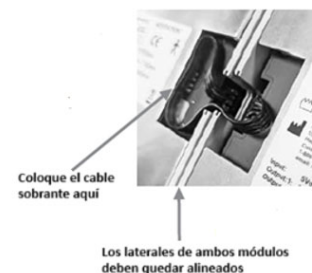

Garantía: Los transformadores y módulos de extensión Diagnostix Adstation tienen una garantía de cinco años a partir de la fecha de compra. La garantía no se aplica a daños causados por manipulación inadecuada, accidentes, uso indebido o alteraciones realizadas al instrumento por terceros. Los daños causados por la conexión de módulos de extensión incompatibles no están cubiertos; verifique la compatibilidad de todos los componentes antes de la instalación. La garantía solo es válida después de registrar el producto en línea en: www.adctoday.com/support/warranty-registration.



American Diagnostic Corporation
55 Commerce Drive, Hauppauge, NY 11788

tel: 631-273-9600

toll free: 1-800-232-2670

fax: 631-273-9659

www.adctoday.com

email: info@adctoday.com

IB p/n 93-5699-00 rev 4 (05/06/24)

Para registrar su producto, visítenos en
www.adctoday.com y siga los enlaces.

Si tiene preguntas, comentarios o sugerencias, llame gratis en EE. UU. al:

1-800-ADC-2670

Impreso en EE. UU.