


# Istruzioni di montaggio per PROSCOPE™

## Stetoscopi d'insegnamento

(Modelli # 671 e # 661)

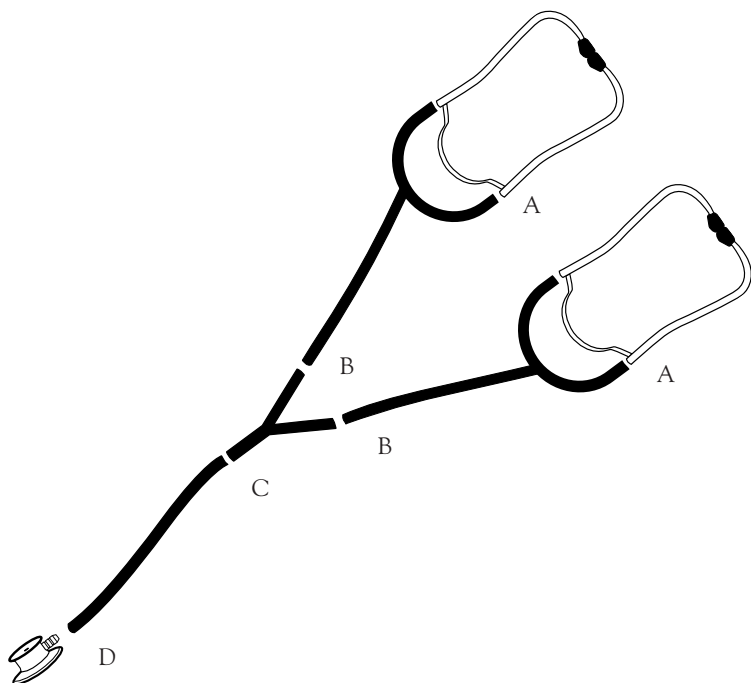

### ASSEMBLARE

- A. Collegare il tubo "Y" a ciascun set dei binaurali (660-05) come mostrato nell'illustrazione.
- B. Attaccare l'estremità libera di ciascun tubo a "Y" all'estremità a doppia coppia del connettore "Y" (# 611-20).
- C. Collegare un'estremità del tubo rettilineo (# 671-05TBK) alla singola estremità del connettore "Y".
- D. Collegare l'estremità rimanente del tubo rettilineo allo stelo del pettorale (n. 660-01 o n. 670-01).

Assicurarsi che tutti i collegamenti dei tubi siano saldi.

# Stethoscopes didattici PROSCOPE™

(Modelli # 671 e # 661)

## Parti di ricambio incluse

| Numero di parte | Descrizione                     | Quantità |
|-----------------|---------------------------------|----------|
| 660-01          | Cassa da infermiera PROSCOPE™   | 1*       |
| 670-01          | PROSCOPE™ Dual Head Chestpiece  | 1*       |
| 611-20          | Connettore "Y"                  | 1        |
| 671-05TBK       | Tubo in PVC, dritto, 10 ", nero | 1        |
| 660-05T         | Tubo in PVC "Y", 22 "           | 2        |
| 660-05          | Archetto                        | 2        |

**\*NOTA:** PROSCOPE™ Il modello # 671 include solo il pettorale 670-01  
PROSCOPE™ Il modello # 661 include solo il torace 660-0

### Per i consumatori australiani

I nostri prodotti vengono forniti con garanzie che non possono essere escluse dalla legge australiana sui consumatori. Hai diritto a una sostituzione o al rimborso per un errore grave e al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevole prevedibile. Hai anche il diritto di far riparare o sostituire la merce se la merce non è di qualità accettabile e il guasto non costituisce un grave guasto.



ADC  
55 Commerce Drive  
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.  
Unit 6, PO14 1TH  
United Kingdom

tel: 631-273-9600  
1-800-232-2670  
fax: 631-273-9659



Attenzione, vedi  
Istruzioni per l'uso.

[www.adctoday.com](http://www.adctoday.com)

email: [info@adctoday.com](mailto:info@adctoday.com)

