


Instrucciones de ensamblaje para PROSCOPE™

Enseñando estetoscopios

(Modelos n. ° 671 y n. ° 661)

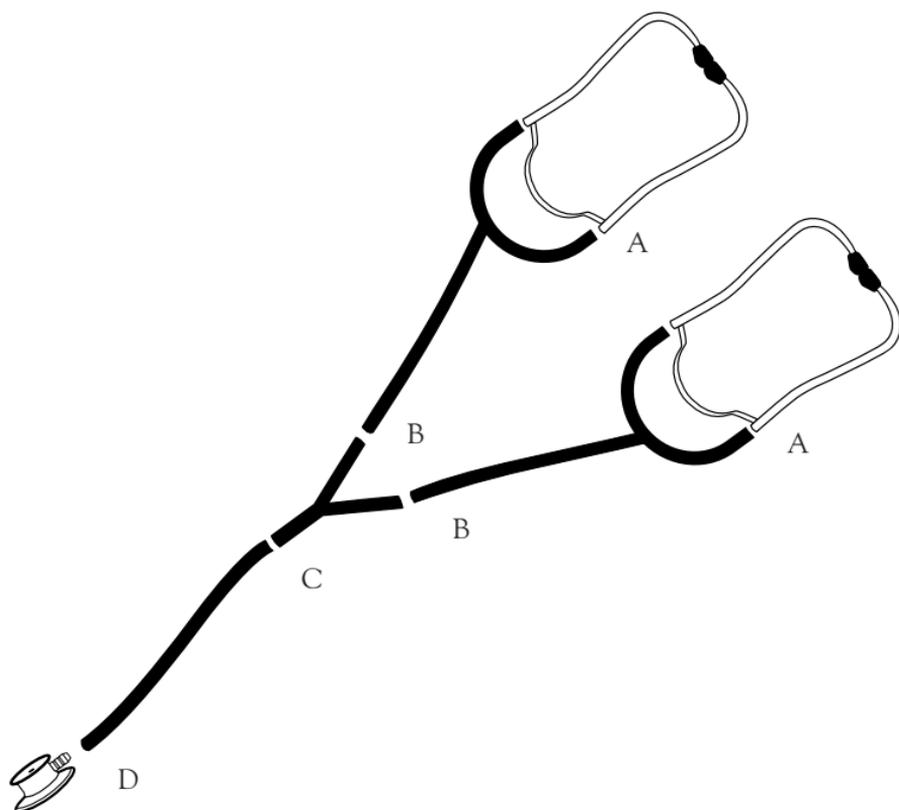

ARMAR

- A. Conecte la tubería en "Y" a cada conjunto de binaurales (660-05) como se muestra en la ilustración.
- B. Conecte el extremo libre de cada tubo en "Y" al extremo del doble par del conector "Y" (# 611-20).
- C. Conecte un extremo del tubo recto (# 671-05TBK) al extremo individual del conector "Y".
- D. Conecte el extremo restante de la tubería recta al vástago de la campana (n. ° 660-01 o n. ° 670-01).

Asegúrese de que todas las conexiones de tubería sean firmes.

PROSCOPE™ Enseñando Estetoscopios

(Modelos n. ° 671 y n. ° 661)

Piezas de repuesto incluidas

Numero de parte	Descripción	Cantidad
660-01	Pechera de enfermera PROSCOPE™	1*
670-01	Cofre de cabeza doble PROSCOPE™	1*
611-20	Conector "Y"	1
671-05TBK	Tubo de PVC, Recto, 10 ", Negro	1
660-05T	Tubo de PVC "Y", 22 "	2
660-05	Binaurales	2

***NOTA:** PROSCOPE™ Modelo # 671 incluye solo la pieza de cofre 670-01
PROSCOPE™ Modelo n. ° 661 incluye solo el cofre 660-01

Para los consumidores australianos

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas en virtud de la Ley de Consumo de Australia. Tiene derecho a un reemplazo o reembolso por una falla importante y compensación por cualquier otra pérdida o daño previsible razonable. También tiene derecho a que los bienes sean reparados o reemplazados si las mercancías no son de calidad aceptable y la falla no constituye una falla importante.



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

tel: 631-273-9600
1-800-232-2670
fax: 631-273-9659



Atención, mira
Instrucciones de uso.

www.adctoday.com

correo electrónico: info@adctoday.com

