

MONTAGEANLEITUNG

Diagnostix Uhren-Aneroidmanometer Wand (750W) y Mobil (752M)




Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie uns unter www.adctoday.com/register

**FÜR FRAGEN, KOMMENTARE ODER ANREGUNGEN RUFEN SIE GEBÜHRENFREI AN:
1-800-ADC-2670**

**ODER BESUCHEN SIE
www.adctoday.com/feedback**

Montage des mobilen Ständers

1. Legen Sie die Basis auf die Seite und verbinden Sie das äußere Aufrichtrohr mit der Basis mithilfe der langen 6-mm-Sechskantschraube und der Unterlegscheibe. Ziehen Sie die Verbindung mit dem beiliegenden großen Sechskantschlüssel fest. Ziehen Sie alle Verbindungselemente so fest wie möglich an. (Um ein Lockern zu verhindern, überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verbindungselemente fest angezogen sind.) Stellen Sie die Basis wieder aufrecht.
2. Schieben Sie das innere Rohr aus Edelstahl mit dem offenen Ende nach oben in das äußere Rohr. Stellen Sie sicher, dass sich die Stoßdämpferfeder im Inneren des äußeren Rohres befindet, und ziehen Sie alles fest.
3. Befestigen Sie den Metallkorb mithilfe von zwei 3-mm-Sechskantschrauben an der Plattform. Ziehen Sie die Schrauben mit dem beiliegenden kleinen Sechskantschlüssel fest.

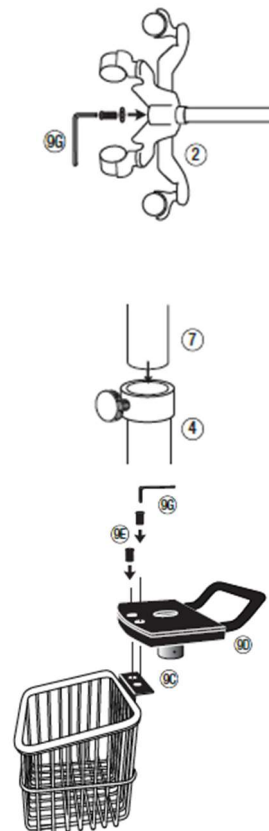

4. Befestigen Sie die Manometerhalterung (mit angebrachtem Manometer) mithilfe der kurzen 6-mm-Sechskantschraube und der Unterlegscheibe an der Plattform. Ziehen Sie die Verbindung mit dem großen Sechskantschlüssel fest.




5. Platzieren Sie die Baugruppe bestehend aus Manometer, Manschettenaufbewahrungskorb und Plattform oben auf dem inneren Rohr aus Edelstahl und stellen Sie sicher, dass das Rohr vollständig in die Hülse eingeführt wird. Verwenden Sie die Feststellvorrichtung und den kleinen Sechskantschlüssel wie abgebildet.

6. Verbinden Sie den Spiralschlauch mit dem Manometereinlass. (Hinweis: Der Spiralschlauch kann schwierig anzuschließen sein; befeuchten Sie ihn bei Bedarf mit Seifenwasser.) Weitere Anweisungen zur Bedienung des Geräts entnehmen Sie bitte der Broschüre mit dem Titel Diagnostix Aneroids: Pocket, Palm, Clock Type (9350N-00).

Teilleiste

Ref.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
1	972-101	Lange 6mm Sechskantschraube und Unterlegscheibe
2	972-080W	Basis
3A	972-106-1	Einzelrolle (3)
3B	972-106L-1	Einzelbremsrolle (2)
4	972-107W	Außenrohr, Weiß
5	972-108	Knopf
6	972-109	Feder
6A	972-107A	Dichtung
7	972-110	Innenrohr
8	972-111	Feststellvorrichtung
9A	752-113N	Manometerhalterung
9B	752-114	Kurze 6 mm Sechskantschraube und Unterlegscheibe
9C	752-119W	Manschettenaufbewahrungskorb, Weiß
9D	752-117W	Plattform, Weiß
9E	752-118W	3-mm-Sechskantschraube (2), Silber
9F	752M-116	Großer 6-mm-Sechskantschlüssel
9G	752M-117	Kleiner 3-mm-Sechskantschlüssel

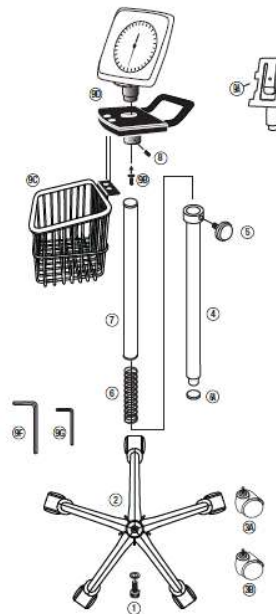

Wandmontage

Enthaltenes Befestigungsmaterial

- Zwei Schrauben, Zwei Schraubenanker



Benötigtes Werkzeug


- Mittlerer Kreuzschlitzschraubenzieher, Hammer, Bohrmaschine mit 3/16"-Bohrer

Anweisungen

1. Nehmen Sie das Uhren-Aneroidmanometer und die Korbeinheit aus der Verpackung und bestimmen Sie den gewünschten Standort und die gewünschte Höhe.
2. Schneiden Sie die Schraubenvorlage (unten) aus und positionieren Sie sie in der Mitte des gewählten Standorts. Markieren Sie die zwei Schraubenlöcher mit einem Bleistift.
3. Bohren Sie an jeder Bleistiftmarkierung ein 3/16"-Loch mit einer Tiefe von ungefähr 7/8". Verwenden Sie einen Mauerwerksbohrer, wenn Sie durch Keramikfliesen bohren.
4. Klopfen Sie mit dem Hammer die Schraubenanker vorsichtig in die Löcher, bis sie bündig mit der Wand abschließen.
5. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben direkt in die Anker, sodass ein Überstand von etwa 1/8" verbleibt.
6. Positionieren Sie die Uhren-Baugruppe über den Schrauben und führen Sie dann die Schraubenköpfe in die Schlüssellochöffnungen auf der Rückseite ein.
7. Schieben Sie die Baugruppe nach unten, um sie einzurasten.

Hinweis: Wenn das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Installation nicht geeignet ist, wählen Sie Befestigungsmaterial in angemessener Größe und Art, um das Gerät sicher an der Wand zu befestigen.

Wandmontage-Schraubenvorlage

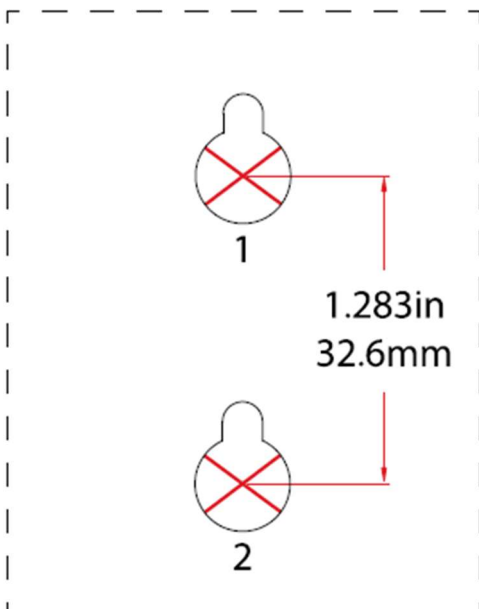

55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
Customer Service: 1-800-ADC-2670
Voice: 1-631-273-9600
Fax: 1-631-273-9659
email: info@adctoday.com
<http://www.adctoday.com>