


DIAGNOSTIX™ 922

- ESQUEMÁTICO
- LISTA DE PARTES

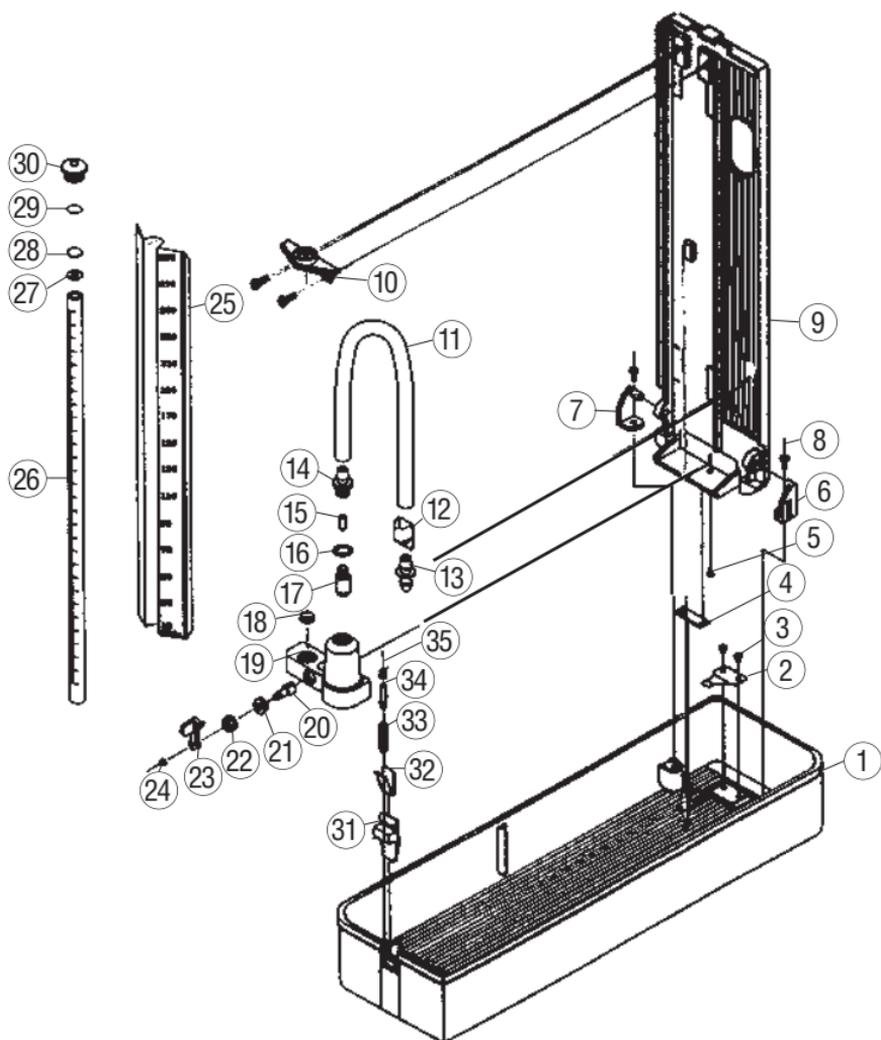

922 DIAGNOSTIX™ UNIDAD DE MERCURIO DE ESCRITORIO DE ESCRITORIO



922 DIAGNOSTIX™ UNIDAD DE MERCURIO DE ESCRITORIO

Referencia #	Ít.#	Descripción
1	922-101	Cubierta inferior
2	922-102	Placa de bloqueo de la cubierta
3	922-103	Tornillos de la placa de bloqueo (2)
4	922-104	Tapa de bloqueo de la cubierta
5	922-105	Tornillo del depósito (1)
6	922-106	Bisagra de Cubierta, Derecha
7	922-107	Bisagra de cubierta, izquierda
8	922-108	Tornillos de bisagra (2)
9	922-109	Placa de cubierta
10	922-110	Soporte de la placa de la escala
11	922-111	Tubo del alimentador del depósito (exterior)
12	922-112	Guía de Tube
13	891	Juego de conectores Luer, Metal
14	922-114	Conector del depósito
15	922-115	Tapón del filtro del depósito
16	922-116	Junta del conector del depósito
17	922-117	Tubo del alimentador del depósito (interior)
18	922-118	Junta de goma
19	922-119	Ensamblaje del depósito
20	922-120	Barra de bloqueo del depósito
21	922-121	Cojinete
22	922-122	Tornillo de bloqueo
23	922-123	Palanca de bloqueo
24	922-124	Tuerca hexagonal de palanca de bloqueo
25	922-125	Placa de Escala
26	922-126	Tubo graduado de plástico de cartucho, 4mm
27	922-127	Junta de goma
28	922-128	Tapón del filtro
29	922-129	Diafragma
30	922-130	Tapón de rosca
31	922-131	Botón de liberación
32	922-132	Botón Primavera
33	922-133	Muelle del émbolo
34	922-134	Émbolo
35	922-135	Tornillo de émbolo

CONEXIÓN DEL SISTEMA DE INFLACIÓN AL MANÓMETRO

Retire la tapa roja que sella el depósito que contiene mercurio. Conecte firmemente el extremo libre del tubo del depósito a la entrada de aire. Guarde la tapa de seguridad roja para usarla más tarde. Cuando transporte el instrumento de mercurio, recomendamos que cambie la tapa de seguridad roja.

Tenga en cuenta: Es normal que cantidades insignificantes de gotas de mercurio residual se acumulen alrededor de la entrada de aire debajo de la tapa de seguridad roja durante el transporte.

Advertencia: *Antes de transportar este instrumento, el mercurio debe almacenarse en el tanque y la cerradura del depósito DEBE cambiarse a la posición de apagado para evitar derrames de mercurio.*

PARA OBTENER INSTRUCCIONES SOBRE EL DESMONTAJE DE LA UNIDAD, CONSULTE EL DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ADJUNTO Y LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.

OBSERVE POR FAVOR: EL MERCURIO ES TÓXICO. FIJE EL MERCURIO DENTRO DEL RESERVADOR ANTES DE REPARAR LA UNIDAD. SIEMPRE USE ROPA PROTECTORA (GUANTES Y GAFAS) AL LIMPIAR O AL SERVICIO DE LA UNIDAD. LIMPIE CUALQUIER MERCURIO DERRAMADO UTILIZANDO APROBADO KITS DE CONTENCIÓN DE MERCURIO. ÚNICAMENTE TÉCNICOS DE SERVICIO ADECUADOS DEBE TENTAR SERVICIO A LA UNIDAD. CONSULTE EL MANUAL CERTIFICADO DERECHO "APENAS EN CASO" PARA LOS PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR CON UN DERRAME DE MERCURIO.

Para registrar su producto, visítenos www.adctoday.com/register

PARA PREGUNTAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS LLAME GRATIS:

1-800-ADC-2670

O VISITE www.adctoday.com/feedback

Este manual está disponible en línea en una variedad de idiomas, siga los enlaces para las opciones de idioma.

www.adctoday.com/care



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
U.S.A.

tel: 631-273-9600
sin cargo: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com

Correo electrónico: info@adctoday.com